


EASYPD^{MD} – COMMENT...

MODIFIER LE TYPE DE CARTOUCHE

REMARQUE : Le type de cartouche doit être réglé lorsqu'il n'y a **PAS** de cartouche dans l'appareil.




1 Mettez le dispositif easypod sous tension, puis appuyez sur le bouton **MENU** à l'écran principal.

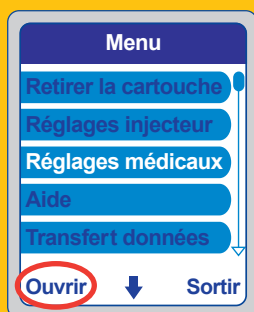

2 Utilisez le bouton de la flèche pour descendre jusqu'à l'option **RÉGLAGES MÉDICAUX**, puis appuyez sur **OUVRI**.



3 Appuyez sur **OK** au message d'erreur. Entrez le code PIN **0000** en utilisant le bouton de la flèche pour sélectionner **0**, puis appuyez sur **OK**. Répétez cette étape jusqu'à ce que le code **0000** soit entré, puis appuyez sur **OK**.

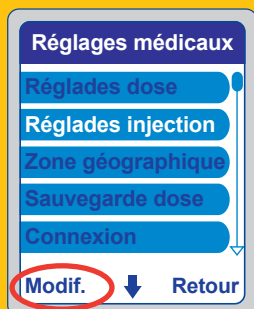

4 Utilisez le bouton de la flèche pour descendre jusqu'à l'option **RÉGLAGES INJECTION**, puis appuyez sur **MODIF**.

5 Sélectionnez **CARTOUCHE** et appuyez sur **MODIF**.

Les options suivantes seront offertes :

A – 8.00mg/ml pour les cartouches de 12 mg et 20 mg

B – 5.83 mg/ml pour les cartouches de 6 mg

6 Sélectionnez la cartouche appropriée à l'aide du bouton de la flèche, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur **OK** une autre fois pour confirmer le type de cartouche.

7 Une fois que le type de cartouche a été sélectionné, appuyez sur **RETOUR** pour retourner au menu Réglages médicaux. Si aucun autre changement n'est nécessaire, appuyez sur **RETOUR** une autre fois, puis sur **SORTIR** pour retourner à l'écran principal.



Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez les **Instructions d'utilisation** du dispositif easypod.



easypod^{MD} est une marque de commerce déposée de Merck KGaA. Tous droits réservés.
© 2020 EMD Serono, une division d'EMD Inc., Canada, filiale de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.

